







SANI SYSTEM CHECK



Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod.

POLTI SANI SYSTEM vydává suchou páru o vysoké teplotě (180 °C), kombinovanou se sanitárním prostředkem HPMed. Toto zařízení zabraňuje šíření infekcí vznikajících z bakterií, plísní a virů na místech, která jsou čistěna.

POLTI SANI SYSTEM lze použít všude tam, kde je nutné snížit mikrobiální kontaminaci (nemocnice, pečovatelské domy, ordinace lékařů, veřejná místa, dopravní prostředky, zařízení se zpracováváním potravin, farmaceutické společnosti, atd.).

LEGENDA

GENERÁTOR

- A) Hlavní spínač ON/OFF
- B) Číselná klávesnice
- C) Displej
- D) Tiskárna
- D1) Výstup papíru
- D2) LED Tiskárna
- D3) Tlačítko OPEN / OTEVŘÍT
- D4) Tlačítko FEED / POSUNOVAT
- D5) Vstup na kartu
- E) Signalizační světlo
- F) Ukazatel tlaku
- G) Bezpečnostní víčko nádrže
- H) Napájecí kabel
- I) Držadlo
- L) Tyč pro podporu hadice
- M) Monohadice

DODACÍ ZAŘÍZENÍ

- N) Světlo
- O) Nosné držadlo
- P) Stlačovací tlačítko na vytváření páry
- Q) Místo pro HPMed láhev
- Q1) HPMed láhev
- R) Adaptér pro seřizování proudu páry
- S) Distanční rozpěrka
- T) Kartáč
- U) Karta

TECHNICKÁ DATA

Napětí:.....220-240 V~
Frekvence:.....50/60 Hz

Max. proudění:.....11A
Max. výkon:.....2250W
Výkon nádrže:.....2200W
Přidaná jednotka výkonu:.....950W
Stupeň ochrany:.....IPX4
Pojistky:.....16A
Provozní teplota:.....18 - 35°C
Provozní vlhkost:.....40 - 70 %

VÝKONNOST

Spotřeba páry:..... 100 g/min
*Garantovaná průměrná spotřeba HPMed
prostředku:..... 0.4 ml/min
Teplota páry:.....180°C
Tlak:.....4 - 6 bar

* Provozní doba jedné láhve striktně závisí na podmínkách, při kterých se SANI SYSTEM POLTI používá, a na rozloze čistěných povrchů.



Toto zařízení je v souladu se směrnicí 93/42/EHS.

Polti S.p.A. si vyhrazuje právo na změnu vybavení či příslušenství bez předchozího udání.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**DRŽTE SE TĚCHTO POKYŇŮ**

- Tento přístroj je určen a vytvořen pouze k použití v uzavřených prostorách, nikdy ne venku.
- **PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE JE DOPORUČENO NASMĚŘOVAT PRVNÍ PROUD PÁRY NA HADRÍK NEBO SMĚREM NA ZEM NA ZHRUBA 30 VTEŘIN BEZ PŘIPOJENÍ DISPONIBILNÍ LÁHVE (Q1). TO UMOŽNÍ DOSAŽENÍ OPTIMÁLNÍ TEPLoty A SPRÁVNÉHO TLAKU.**
- Před použitím přístroje SANI SYSTEM POLTI na jemné nebo neobvyklé povrchy si prostudujte instrukce poskytnuté výrobcem a vždy proveďte zkoušku nejprve na skryté části nebo na vzorku materiálu. Nechte napařenou oblast vychladnout, abyste se ujistili, že se nezměnila barva nebo nedošlo k jiné deformaci materiálu.
- Přečtěte si pečlivě tyto pokyny k použití přístroje před jeho použitím a ujistěte se, že každý, kdo stroj používá, je obeznámen s těmito pokyny a varováními.
- Jakékoli použití, které není v souladu s těmito pokyny, vede k neplatnosti záruky.
- Rozvodný systém, se kterým je přístroj spojen, musí být vždy v souladu s platnými právními předpisy.
- Před připojením přístroje zkontrolujte, že napájecí napětí je stejné, jako napětí uvedené na datovém štítku zařízení, a že zásuvka je uzemněna.
- Vždy vypněte přístroj tlačítkem zapnutí / vypnutí (ON/OFF) před odpojením ze zásuvky.
- Pokud je přístroj ponechán bez použití, vždy jej odpojte z elektrické sítě. Nikdy jej nenechávejte bez dozoru s kabelem připojeným do elektrické sítě.
- Vždy se ujistěte, že je přístroj odpojen před prováděním údržby jakéhokoli druhu
- Nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky tahem, ale vždy uchopte samotnou zástrčku, aby nedošlo k poškození zásuvky.
- Nedovolte, aby byl napájecí kabel zkroucený, drcený, roztahovaný nebo přišel do styku s ostrými nebo horkými povrchy.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou jeho napájecí kabel nebo další důležité díly poškozeny.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, které nejsou povoleny výrobcem, protože může dojít k poškození nebo požáru.
- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřma rukama nebo nohama, když je kabel zapojen do elektrické sítě.
- Nepoužívejte přístroj, když jste naboso.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchového koutu nebo nádob plných vody.
- Nikdy neponožujte přístroj, kabel nebo zástrčky do vody nebo jiné tekutiny.
- Používání přístroje v místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu, je zakázáno.
- Nepoužívejte výrobek v kombinaci s toxickými látkami.
- Nepokládejte horké zařízení na povrchy citlivé na teplo.
- Nevystavujte přístroj větru nebo dešti.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti živých elementů, elektrického sporáku nebo jiných zdrojů tepla.
- Nevystavujte přístroj vysokým teplotám.
- Nikdy nedovolte, aby děti nebo lidi, kteří nejsou obeznámeni s fungováním přístroje, jej používali.
- Stiskněte tlačítka bez použití nadměrné síly a nepoužívejte špičaté předměty, například pera.
- Vždy pokládejte přístroj na stabilní povrch.
- V případě náhodného pádu přístroje na zem je nutné, aby byl zkontrolován v autorizovaném servisním středisku, protože mohlo dojít k ovlivnění vnitřních bezpečnostních prvků.
- V případě poruchy nebo selhání přístroje se nikdy nepokoušejte přístroj rozebírat, nýbrž se odkažte na autorizované servisní středisko Polti.
- Aby nedošlo k narušení bezpečnosti zařízení, používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem.

- Nenavíjejte napájecí kabel kolem přístroje, zvláště když je přístroj ještě horký.
- Při doplňování vody vypněte a odpojte přístroj z elektrické sítě.
- Při používání je nutné držet přístroj ve vodorovné poloze.
- Nemiřte parní tryskou na elektrické a / nebo elektronické přístroje nebo na samotný spotřebič.
- Nechte přístroj vychladnout před čištěním.
- Před uložením přístroje se ujistěte, že zcela vychladnul.
- Tento přístroj je vybaven bezpečnostními zařízeními, která nahrazuje pouze vhodně kvalifikovaný technik.
- Nikdy nedávejte žádné čisticí prostředky nebo chemické látky do nádrže.
- Nemiřte parní tryskou na lidi, zvířata nebo suť.
- Nikdy nedávejte ruce do proudu páry.



POZOR:
Nebezpečí popálení!

- Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo pro osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nedostaly instrukci o používání přístroje od osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si nehrály s přístrojem.



VAROVÁNÍ: Vysoká teplota.
Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se částí uvedených na produktu

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte jiné chemické produkty, než jsou doporučovány výrobcem.

Polti S.p.A. garantuje správnou funkčnost přístroje pouze pokud je používán dezinfekční produkt HPMed. Pokud použijete jiný produkt než je HPMed, Polti odmítá veškerou zodpovědnost a záruka nebude nadále platná.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Tento přístroj třídy All je určen pro profesionální použití jako zdravotnický prostředek k dezinfekci v souladu s popisy a pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze. SANI SYSTEM vydává nasycenou páru o vysoké teplotě kombinovanou s HPMed. Systém snižuje bakteriální, plísňové a virové zatížení povrchů, na které je aplikován. Díky tomu se snižuje případná možnost výskytu křížených infekcí. Prosím, přečtěte si tyto pokyny pečlivě a uschovejte je pro budoucí použití.

Polti odmítá veškerou odpovědnost za škody nebo nehody vyplývající z nevhodného používání tohoto přístroje, které nejsou v souladu s pokyny obsaženými v této příručce.

POZOR

Směrnice 2002/96/ES (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - OEEZ).

Informace pro uživatele. Tento výrobek je v souladu se směrnicí EU 2002/96/ES.



Symbol přeškrtnutého koše na spotřebiči znamená, že na konci své provozní životnosti, musí být výrobek likvidován odděleně od běžného domácího odpadu.

Uživatel je zodpovědný za doručení přístroje do příslušného sběrného zařízení na konci jeho provozní životnosti.

Vhodně tříděný sběr umožňující recyklaci, zpracování a environmentálně kompatibilní likvidace, pomáhá zabránit negativnímu dopadu na životní prostředí a lidské zdraví a podporuje recyklaci materiálů, z kterých byl tento produkt vyroben. Pro více informací o dostupnosti sběrných zařízení se obraťte na místní sběrný dvůr.

HPMED

Vlastnosti HPMed ho dělají ideálním doplňkem do SANI SYSTEM POLTI přístroje pro dezinfekci všech povrchů vystavených riziku kontaminace patogenními organismy, zejména bakterií. Účinek HPMed prostředku se zvyšuje v kombinaci s vysokou teplotou. SANI SYSTEM POLTI vydává vysokou teplotu a HPMed dodává dezinfekční prostředek, který je tak možné aplikovat také na nejméně přístupná místa. Přístroj nejen že dezinfikuje, ale také eliminuje pachy.

Návod k použití:

Přidělte disponibilní láhev do zásobovacího zařízení dle instrukcí uvedených v odstavci „Disponibilní láhev HPMed“. Zapněte přístroj SANI SYSTEM POLTI dle instrukcí výrobce. Jakmile je systém připraven, naneste páru s HPMed. Společně s párou by měl produkt za běžných podmínek uschnout během 30 vteřin až jedné minuty, v závislosti na prostředí.

Upozornění:

Skladujte mimo dosah dětí. Zákaz požívání. V případě zasažení očí, vypláchněte je dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnostní list je k dispozici pro profesionální uživatele.

Pouze pro profesionály:

HPMed je čistící prostředek na těžké povrchy. Obsahuje méně než 5% neionogenních povrchově aktivních látek (EEC Reg. 648/2004).

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

- Odšroubujte víko nádrže (**G**) a naplňte nádrž asi 4,5 l normální vody z kohoutku. Je doporučeno odpojit přístroj z elektrické sítě před jeho naplněním.
- Nasadte držadlo (**I**) k přístroji dle znázornění na obr. 1, utažením dvou šroubů na zadní straně přístroje v místech k tomu určených.
- Zasuňte tyč na podporu monotrubice (**L**) do jejího otvoru (obr. 2).
- Zapojte napájecí kabel (**H**) do přístroje z jeho zadní části do zásuvky k tomu určené. Konektor na druhém konci napájecího ka-

belu zapojte do vhodné zásuvky s uzemněním.

- Přidělte disponibilní láhev do dávkovacího zařízení dle instrukcí uvedených v odstavci „Disponibilní láhev HPMed“.

PŘIPOJENÍ

- Otočte spínač ON-OFF (**A**) do polohy "I".
- Na displeji (**C**) se zobrazí datum a čas. Stiskněte tlačítko "OK" na numerické klávesnici (**B**) pro potvrzení. Pokud se datum a čas nezobrazí automaticky, je nutné je zadat ručně pomocí numerické klávesnice a stisknutím tlačítka "OK" je potvrdit.
- Na displeji se objeví výzva "**PRINT last logout? / TISK posledního odhlášení?**". Pokud chcete vystisknout souhrn poslední prováděné operace tímto přístrojem, stiskněte tlačítko "OK" na numerické klávesnici. V opačném případě stiskněte tlačítko "**CANC**".
- Přístroj se spustí a na displeji se objeví slovo **LOGIN / PŘIHLÁŠENÍ**.
- Do otvoru (D5) vložte kartu (**U**).
- Objeví se následující informace: V případě blikání "**HEATING / VYTÁPĚNÍ**" to znamená, že zařízení je v topné fázi. Jakmile je dosaženo požadovaného tlaku, objeví se slovo "**READY / PŘIPRAVEN**", což znamená, že přístroj je připraven k použití. Objeví se také signalizace IDXX (XX odpovídá číslu karty vložené do přístroje). **Poznámka: Nevytahujte kartu z přístroje během jeho užívání.**

Pokud je karta během použití vytažena, přístroj přestane pracovat a na displeji se zobrazí zpráva "**LOCKED - INSERT CARD IDXX / ZAMČENO - VLOŽTE KARTU IDXX**". Pro odemčení a dokončení práce, je nutné vložit zpět stejnou kartu dříve použitou k prvnímu přihlášení. Pokud tak učiníte, objeví se veškerá data z předchozího užívání uložená v paměti přístroje.

Karty dodávané spolu s přístrojem jsou již nakonfigurovány a budou fungovat pouze s dodaným přístrojem. V případě nákupu nových karet je nutné je naformátovat. Jak

SANI SYSTEM CHECK

toto provést se dozvíte v odstavci "Formátování nových karet".

- Jakmile jste přihlášení do systému, na displeji se objeví následující:

"Prog:___" Je nutné zadat číslo programu, který chcete spustit. Číslo programů obsahují dvě číslice.

Existují čtyři přednastavené programy: 00, 01, 02 a 03.

Zadejte číslo zvoleného programu přes numerickou klávesnici a stikněte OK.

Pokud jste zadali špatné číslo programu, odstraňte jej pomocí tlačítka CANCEL.

"AREA / OBLAST" Uživatel je zodpovědný za nakódování oblasti, která není automaticky nastavena v softwaru produktu. Toto pole je zdarma a nepovinné.

Je možné přiřadit číslo ke každé oblasti, která bude dezinfikována, čímž bude možné sledovat každou operaci prováděnou v dané oblasti. Zadané číslo k oblasti bude uvedeno na vytištěném výpisu.

Číslo oblasti je možné zadat v rozmezí čísel 01 – 99. Pokud nechcete oblast očíslovat zadejte 00. V obou případech následně potvrďte tlačítkem OK.

Pokud jste zadali špatné číslo oblasti, odstraňte jej pomocí tlačítka CANCEL. Kromě toho můžete využít tlačítko CANCEL také k navrácení se k předešlé operaci, což je volba programu k čištění.

Jakmile zadáte veškeré požadované předchozí parametry, objeví se na displeji následující informace:

Prog: __ Číslo programu, které bylo zvoleno.
TIME: __ Zbývající čas ve vteřinách závislý na zvoleném programu.

PROGRAMY

PROGRAM 00

Program 00 je volitelný program, při kterém uživatel může využít přívod páry po maximální dobu 3600 vteřin.

3 vteřiny po skončení užívání přístroje se na displeji objeví slovo **"PRINT? / TISK?"** a zároveň se rozsvítí signalizační světlo (E).

Od tohoto okamžiku bude možné vytisknout souhrnný list provedeného sanitárního čištění.

Proces tisknutí:

- Stisknete tlačítko OK
- Po vypršení časového limitu (po skončení 3600 vteřinách prováděného čištění)
- Odhlášení

Pozor: Pokud stisknete tlačítko CANCEL, zvolené informace o aktuálním prováděném čištění nebudou vytištěny. Uloží se do paměti přístroje a po odhlášení dojde k automatickému vytisknutí souhrnného listu.

PROGRAMY 01 / 02 / 03

Programy 01, 02 a 03 umožňují nadefinovat dobu prováděného čištění:

- 01** - 180 vteřin + 60 vteřin (extra čas)
- 02** - 360 vteřin + 120 vteřin (extra čas)
- 03** - 600 vteřin + 180 vteřin (extra čas)

Délka programu je vyjádřena jako skutečná doba, po kterou bude produkována pára.

Na konci minimální doby stanovené pro každý program (program 01 - 180 vteřin, 02 - 360 vteřin, 03 - 600 vteřin) se rozsvítí signalizační světlo (E), zazní signál a na displeji se objeví **"PRINT? / TISK?"**.

V tento moment je možné prováděnou operaci zastavit a stisknutím tlačítka OK vytisknout souhrn.

V každém případě je možné pokračovat v užívání páry pro extra danou dobu, která je závislá na zvoleném programu (program 01 – 60 vteřin, 02 – 120 vteřin, 03 – 180 vteřin). Každou operaci je možné kdykoliv ukončit a vytisknout souhrn stiskem tlačítka OK, i přesto, že extra čas ještě nevypršel. Vždy, když se na displeji objeví **"PRINT? / TISK?"**, jsou k dispozici dvě možnosti:

- Pokud stisknete tlačítko OK, bude u vytištěn souhrn obsahující informace o programu, který právě skončil.
- Pokud stisknete tlačítko CANCEL, zvolené informace o aktuálním prováděném čištění nebudou vytištěny. Uloží se do paměti přístroje a po odhlášení dojde k automatickému vytisknutí souhrnného listu.

Vytištěný souhrn bude ukazovat **"PROG: OK"**, pokud byl cyklus proveden správně, nebo **"PROG: NOT VALID / PROG: NEPLATNÝ"** v případě, že cyklus byl přerušen odhlášením uživatele, nebo v případě poruchy zařízení.

KONEC OPERACE / ODHLÁŠENÍ

Po dokončení prováděných dezinfekčních operací se musíte odhlásit. Pro odhlášení stiskněte klávesu CANC po dobu 4vteřin. V tento moment budou vyčištěny všechny operace provedené v době od přihlášení do odhlášení.

Přístroj se opět vrátí do své původní konfigurace a bude vyžadováno přihlášení. Pro opětovné přihlášení vyjměte kartu z přístroje a vložte ji zpět dovnitř.

Pro ukončení operace, vypněte přístroj pomocí hlavního spínače ON-OFF (A).

Poznámka: V případě, že karta použitá k přihlášení signalizuje omyl nebo byla poškozena, je možné přístroj odemknout pomocí karty (S.U.) "SUPER USER / SUPER UŽIVATEL", která je součástí dodávky. Po vložení této karty do otvoru (D5) v přístroji, proces odhlášení bude automaticky proveden a souhrn poslední prováděné operace bude vytištěn.

PŘÍVOD PÁRY

- Stiskněte tlačítko (P) k vytváření páry z dávkovacího zařízení. Signalizační kontrolka (N) zhasne, jakmile odpor uvnitř dávkovacího zařízení dosáhne své provozní teploty. Dávkovací tlačítko dodávky páry (P) je na "bezpečném místě" tak, aby se zabránilo náhodnému spuštění páry.
- Jakmile je přístroj v provozu, signalizační světlo (N) se rozsvítí a zhasne. To znamená, že odpory začínají správně pracovat a udržují stabilní tlak v nádrži a teplotu v dávkovacím zařízení. To napomůže k pravidelnému používání normálního přísunu páry pro dezinfekci.

Poznámka:
PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE JE DOPORUČENO NASMĚROVAT PRVNÍ PROUD PÁRY NA HADŘÍK NEBO SMĚREM NA ZEM NA ZHRUBA 30 VTEŘIN BEZ PŘIPOJENÍ DISPONIBILNÍ LÁHVE (Q1). TO UMOŽNÍ DOSAŽENÍ OPTIMÁLNÍ TEPLoty A SPRÁVNÉHO TLAKU.

PRAKTICKÉ RADY PRO POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Před zahájením nanášení dezinfekce na jemné nebo speciální povrchy pomoci přístroje SANI SYSTEM POLTI, konzultujte s pokyny výrobce, a vždy pokračujte v dezinfikování pouze po provedeném testu na skryté části povrchu nebo malém vzorku. Po ošetření místa párou jej nechte zaschnout a zkontrolujte, zda nedošlo ke změně barvy nebo k nějakým jiným deformacím.

Ujistěte se před začátkem dezinfikování povrchů, zda jsou řádně čisté a nejsou na nich viditelné nečistoty. V případě, že jsou na dezinfikovaných površích nečistoty, odstraňte je a poté pokračujte v sanitaci.

Nasměřujte páru nejprve po dobu 2 vteřin na zem, čímž se všechny součásti přístroje uvedou do správné teploty a zabrání se tak kondenzaci.

Nastavte parní hubici do kolmé polohy k povrchu, který bude dezinfikován. Držte ji ve vzdálenosti 10 cm od povrchu, k čemuž pomůže namontovaná distanční rozpěrka (S), aby se zabránilo přímému kontaktu dezinfekční látky s povrchem. Aplikujte páru nepřetržitým "kartáčovacím" pohybem, aby byla provedena dezinfekce po celém povrchu. Opakované ošetření vede k účinnější dezinfekci ošetřených ploch. Produkt HPMed by měl společně s produkovanou párou za běžných podmínek uschnout během 30 vteřin až jedné minuty, v závislosti na prostředí.

K dezinfikování potrubí, odtoků, atd. připojte k parní hubici adaptér na regulaci přísunu toku páry (R), čímž se získá koncentrovaný výstupní proud páry. Před použitím přístroje se ujistěte, že materiál, který má být ošetřen může odolat vysokým teplotám.

UKAZATEL TLAKU

Přesnost: třída 2,5

Tento přístroj má praktický a přesný ukazatel (F), který okamžitě zobrazuje provozní tlak. Je-li přístroj v pohotovostním režimu, což znamená, že je zapnutý, ale neprodukuje žádnou páru, jeho tlak se udržuje stabilně mezi 4 a 6 bary.

SANI SYSTEM CHECK

DISPONIBILNÍ LÁHEV HP MED

- Odšroubujte uzávěr na disponibilní láhev.
- Našroubujte láhev (**Q1**) do dávkovacího zařízení (**Q**), jak je vyobrazeno na obr. 3.
- K připojení a odpojení dávkovacího zařízení s disponibilní láhví do SANI SYSTEM zařízení slouží páka namontovaná na dávkovacím zařízení (**Q**). Stlačte zařízení ve správné poloze směrem do nastavné parní hubice než uslyšíte cvaknutí (obr. 4). Chcete-li odpojit dávkovací zařízení od hubice, stiskněte páku směrem dolů a oddělte od sebe obě součástky (obr.5).

Jakmile hladina HP Med prostředku klesne pod dolní úroveň uvedenou na etiketě, nahraďte ji novou láhví.

Po otevření disponibilní láhve a aplikování na parní hubici, účinnost HP Med dezinfekčního prostředku je garantovaná po dobu 7 dnů. V případě, že láhev nebude po tuto dobu vyčerpaná, doporučujeme ji nepoužívat a nahradit ji novou disponibilní láhví.

Nedoplňujte disponibilní láhev.

Pro správné dezinfikování doporučujeme pečlivě prostudovat návod k použití SANI SYSTEM přístroje.

PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

K parní hubici je možné připojit následující příslušenství:

Adaptér pro seřizování proudu páry (R)

Toto příslušenství umožňuje dosáhnout koncentrovaného výstupního proudu páry. Výstupy na příslušenství srovnajte s otvory na parní hubici, zatlačte jej do hubice tak daleko, jak jen to půjde, a poté jej otočte ve směru hodinových ručiček (obr. 6).



POZOR! Pokud použijete seřizovač proudu páry, nepřipojujte dávkovací zařízení (**Q**) s disponibilní láhví k přístroji.

Distanční rozpěrka (S)

Rozpěrka se používá k udržení dostatečné vzdálenosti od povrchu pro jeho správné dezinfikování. Pro správné připojení rozpěrky k parní hubici je důležité přiložit plastový

kruh rozpěrky k vrcholu hubice nejprve z jedné strany. Srovnajte obě části k sobě do správné polohy a zafixujte je pomocí kroužku na straně plastového kruhu rozpěrky (obr. 7).

NEDOSTATEK VODY

Pokud je v nádrži nedostatek vody, na displeji se okamžitě ukáže "**WATER EMPTY / NEDOSTATEK VODY**" a zazní zvukový signál. Pro dokončení užívání přístroje naplňte nádrž vodou dle pokynů v části "Příprava k použití".

DOPRAVA

S tímto zařízením lze snadno manipulovat pomocí držadla (**I**) připevněného ze zadní strany přístroje, nebo pomocí dvou bočních držadel. V případě potřeby přepravy zařízení můžete oddělit držadlo (**I**) od přístroje odšroubováním obou křídlových šroubů.

VAROVÁNÍ: Nikdy neposunujte přístroj pomocí parní hadice. Vždy k přesunu zařízení použijte držadlo (**I**) nebo boční úchyty.

USKLADNĚNÍ PŘÍSTROJE

Po dokončení práce s přístrojem ho odpojte z elektrického zdroje a odložte ho na čisté a suché místo. Nevystavujte přístroj zdrojům horka a chraňte ho před povětrnostními vlivy. Nevystavujte přístroj extrémním teplotám.

POUŽÍVÁNÍ TISKÁRNY

Proces výměny papíru v tiskárně je následující:

- Otevřete víko tiskárny stisknutím tlačítka OPEN (**D3**) (obr.8).
- Umístěte roli papíru do vnitřního prostoru tiskárny v pozici, jak je uvedeno na obr. 9.
- Vytáhněte konec papíru tak, aby vyčníval ven, a poté víko tiskárny zavřete (obr.10).
- Odtrhněte přebytečný papír přes zoubkovaný okraj tiskárny (obr.11).
- Papír je možné posunout dopředu stisknutím tlačítka FEED (**D4**).

Do přístroje používejte pouze termální papír, který je snadno dostupný na trhu. Papír skla-

dujte na suchém místě a mimo dosah přímého slunečního záření, aby byla zajištěna delší životnost jak papíru, tak i vytištěných údajů na něm.

FORMÁTOVÁNÍ NOVÝCH KARET

V případě nákupu nových karet, které nebyly dodány spolu s přístrojem, je nutné je naformátovat.

Na vypnutém přístroji stiskněte naráz obě čísla 1 a 2 na numerické klávesnici. Poté zapněte přístroj pomocí hlavního spínače (A) a uvolněte obě tlačítka 1 a 2. Na displeji se objeví označení "INITIALIZE CARD XX / FORMÁTOVÁNÍ KARTY XX", při čemž XX znamená číslo karty, která je formátována. Jde o progresivní číslo, které nelze opakovat. Nyní vložte novou kartu do otvoru (D5) v přístroji a nevytahujte ji dokud se na displeji neobjeví informace "CARD XX INITIALIZED / KARTA XX NAFORMÁTOVÁNA". Po vyjmutí karty z přístroje Vás systém vyzve k formátování další karty. Chcete-li pokračovat ve formátování, postupujte podle pokynů uvedených výše. Pokud ne, vypněte přístroj hlavním spínačem (A). Kartu, která již byla jednou naformátována, nelze přepsat.

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA

Před prováděním jakékoliv údržby na zařízení, vždy jej odpojte z elektrické sítě a nechte jej vychladnout.

Je-li monotrubička prasklá, musí být vyměněna autorizovaným servisním střediskem.

Čištění parní hubice

Vyčistěte parní hubici po každých 10-15 hodinách užívání. K vyčistění vnitřní trysky v hubici použijte kartáč (T), který je součástí balení, aby se z ní odstranily veškeré zbytky usazenin (obr.12).

Mazání spoje

Pokud je obtížné nasadit dávkovací zařízení (Q) do parní hubice, nebo v případě delšího nepoužívání spoje, namažte tento spoj na spodní straně parní hubice syntetickým mazivem (obr.13). Pokud je i po použití lubrikantu obtížné vložit dávkovací zařízení (Q) do parní hubice, kontaktujte autorizované

servisní středisko.

Tipy

V případě působení vnějších faktorů, jako je například náhlá změna napětí v důsledku narušení sítě (výpadek, blesky, atd.), může dojít k ovlivnění dodávky elektrické energie do zařízení a dočasnému ovlivnění jeho funkčnosti.

Doporučujeme zařízení vypnout a odpojit z elektrické sítě na několik minut. Poté přístroj znovu klasicky zapněte. Pokud zařízení stále nefunguje normálně, doporučujeme kontaktovat nejbližší autorizované servisní středisko, k provedení jeho kontroly.

Čištění vnějšku přístroje

Čištění vnějších částí přístroje doporučujeme pomocí vlhkého hadříku. Nepoužívejte rozpouštědla nebo čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch zařízení. Dbejte zvláštní pozornosti k čištění vnějšího povrchu přístroje a pojízdných koleček, hlavně z důvodu přemísťování mezi místnostmi.

UPOZORNĚNÍ: Pro jakékoliv další nutné kroky údržby se obraťte na autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se za žádných okolností rozebírat zařízení, nebo jej otevírat.

Přístroj je přelepen dvěma lepicími štítky proti neoprávněné manipulaci s přístrojem. Jsou-li tyto štítky odstraněny nebo poškozeny nepovolanou osobou, uživatel přístroje tím ztrácí nárok na záruku.

SANI SYSTEM CHECK**ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

PROBLÉM	UVEDENO NA DISPLEJI	ŘEŠENÍ
Prázdná nádrž / nabíjení čerpadla trvá příliš dlouho	Bliká signalizace "WATER MISSING / NEDOSTATEK VODY"	Vypněte a po několika vteřinách opět zapněte zařízení hlavním spínačem (A) (ON/OFF). Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizované středisko Polti.
Nesprávný tlak v nádrži	Bliká signalizace "BOILER PRESSURE / TLAK V NÁDRŽI" a zazní zvukový signál	Vypněte a po několika vteřinách opět zapněte zařízení hlavním spínačem (A) (ON/OFF). Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizované středisko Polti.
Nesprávná teplota při procesu	"WRONG TEMP B / ŠPATNÁ TEPLOTA B" "WRONG TEMP L / ŠPATNÁ TEPLOTA L"	Vypněte a po několika vteřinách opět zapněte zařízení hlavním spínačem (A) (ON/OFF). Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizované středisko Polti.
Nedostatek vody v nádrži	"WATER MISSING / NEDOSTATEK VODY" a spustí se zvukový signál	Vypněte a po několika vteřinách opět zapněte zařízení hlavním spínačem (A) (ON/OFF). Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizované středisko Polti.
Přístroj neumožňuje uživateli přístup	"CARD NOT VALID / NEPLATNÁ KARTA"	Zkontrolujte, zda je vložena karta. Pokud používáte novou kartu, proveďte naformátování karty, jak je popsáno v části "Formátování nových karet".
Zařízení se zastaví a přestane dodávat páru	"LOCKED INSERT CARD / UZAMČENÍ VLOŽENÉ KARTY"	Karta byla vyjmuta z přístroje. Pro přihlášení a pokračování v procesu vložte opět předešlou používanou kartu. Vložením nové karty nebude přístroj odemčen.
Výpadek proudu	V paměti zařízení jsou uloženy všechny prováděné operace kromě té poslední, která byla spuštěna a v průběhu procesu přerušena.	Pokračování v prováděné operaci po obnovení proudu do normálu.